



EMATIK EYES

LINEE GUIDA
ALL'UTILIZZO DEL KIT

Ematik Eyes - Linee Guida

Ematik Eyes è il PRP in collirio per cani, gatti e cavalli. Il PRP in forma liquida di Ematik Eyes protegge l'occhio da pericolose contaminazioni batteriche, stimola la rigenerazione della cornea e riduce il dolore dovuto al danno. Ematik Eyes può essere applicato direttamente dal padrone dell'animale.

In quali casi utilizzare Ematik Eyes

- Ulcere corneali • Sindrome dell'occhio secco • Patologie oculari superficiali • Cheratiti • Congiuntiviti

	PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE CLINICA
QUANTITÀ	5-15 gocce per applicazione
FREQUENZA	2-5 volte al giorno
DURATA TRATTAMENTO	6 giorni

Ripetere il ciclo di trattamento per una seconda volta se necessario.

Dosi e conservazione

Ematik Eyes permette di ottenere 6 dosi di prodotto.

Conservare la dose giornaliera in frigo, e congelare le ulteriori dosi per le successive applicazioni.

Scongelare la dose giornaliera a temperatura ambiente e miscelare delicatamente per inversione prima dell'uso.



Congelare in freezer
per massimo 3 mesi



Scongelare a temperatura
ambiente, e riporre in frigo
per massimo 24 ore

Come preparare Ematik Eyes

1/ Prelievo Ematico

60 ml o 30 ml (minimo) di sangue venoso periferico vengono prelevati

3/ Ripartizione

I 6 ml di PRP liquido ottenuto vengono ripartiti negli appositi blister da 1 ml l'uno da usare per l'applicazione

2/ Separazione Emocomponenti

Il sangue intero viene centrifugato isolando le piastrine, che vengono poi concentrate

4/ Applicazione

Il PRP liquido viene applicato come un collirio per gocciolamento inumidendo tutta la superficie oculare

Come Applicare

1/ APERTURA PALPEBRA

Mantenere la palpebra aperta durante l'applicazione, pena la possibile perdita di principio attivo.

2/ GOCCIOLAMENTO



Il prodotto viene depositato per gocciolamento, per un totale di 5-15 gocce a seconda del caso.

3/ ASSORBIMENTO

Prima di depositare la goccia successiva aspettare che la precedente venga assorbita dall'occhio.

4/ CONSERVAZIONE

Conservare la rimanente dose giornaliera in frigo e le dosi dei giorni successivi in congelatore. Il prodotto deve essere completamente scongelato e ri-miscelato al momento dell'applicazione.

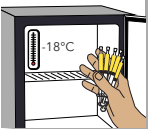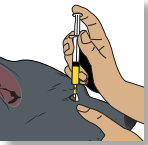




@ematiksystem

ematik_system

customer@ematik.it

+39 351 663 33 05

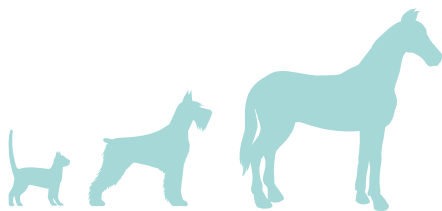

Prometheus srl via Trento, 30 - Parma (Pr)
+39 351 663 3305 www.ematik.it